



**Temperatuur opslag en transport materiaal Klinische Pathologie:**

<b>Patiëntenmateriaal</b>	<b>Bewaren na afname</b>	<b>Transporttemperatuur</b>
Histologie in formaldehyde	kamertemperatuur	kamertemperatuur
Histologie vers CITO/VC	n.v.t./spoedtransport	kamertemperatuur (kort*)
Histologie vers: OK-Apeldoorn	koelkasttemperatuur	kamertemperatuur (kort*)
Histologie vers: OK-Zutphen	koelkasttemperatuur	koeltransport
Histologie vers: placenta	koelkasttemperatuur	kamertemperatuur (kort*)
Histologie vers huid IF: in transportbuffer	koelkasttemp. na afname	kamertemperatuur (binnen 24 uur na afname)
Algemene cytologie: Zutphen	koelkasttemperatuur	koeltransport
Algemene cytologie: Apeldoorn	koelkasttemperatuur	kamertemperatuur (kort*)
Algemene cytologie: CITO/spoed	n.v.t./spoedtransport	kamertemperatuur (kort*)
Algemene cytologie: liquor	n.v.t./spoedtransport	kamertemperatuur (kort*)
Algemene cytologie: glaasjes (punctie)	kamertemperatuur	kamertemperatuur
Algemene cytologie: cytolyt	kamertemperatuur	kamertemperatuur (kort*)
Cervix cytologie (Thinprep)	kamertemperatuur	kamertemperatuur

\*Met 'kort' wordt bedoeld het transport van het verzamelpunt naar de afdeling Klinische Pathologie.