

Wijze van afname histologisch onderzoek, Klinische Pathologie

Instuurprotocollen

De aanvragers binnen Gelre ziekenhuizen maken gebruik van de documenten “Instuurprotocollen Klinische Pathologie (hyperlink form)” en “Obductie aanmelden” in Zenya.

Huisartsen en andere inzenders buiten Gelre ziekenhuizen volgen onderstaande instructies.

Invullen aanvraagformulier (geel:LABO-010)

- Plak een sticker met patiëntgegevens op het formulier of vul het formulier handmatig in: naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer, adres, postcode/woonplaats, zorgverzekeringsnummer en zorgverzekeraar.
- Vermeld bij de klinische gegevens de vraagstelling en overige klinisch relevante opmerkingen.
- Vermeld duidelijk de naam van de aanvragend arts en geef de locatie aan: Apeldoorn, Zutphen, huisarts of een andere instelling.
- Vermeld datum en afnametijd.
- Vermeld aard materiaal en eventueel eerder verricht onderzoeksnummer, of een onderzoek elders verricht dat van belang kan zijn voor het onderzoek.

Formaldehyde fixatie:

Weefselmateriaal voor histologisch onderzoek kan worden ingestuurd in 4% gebufferde formaldehyde. Draai het dekseltje goed aan zodat het potje goed gesloten is. De hoeveelheid formaldehyde moet ten minste 5x het volume van het weefsel bedragen in verband met optimale fixatie van het weefsel.

Neem bij twijfel altijd contact op met een klinisch patholoog: tijdens kantooruren (8.30-17.00 uur) via telefoonnummer 055 – 581 82 50 (secretariaat klinische pathologie) en buiten kantooruren via de portier van Gelre op telefoonnummer 055 – 581 81 81.

Huidbiopten:

Een afgenomen huidbiopt moet ingestuurd worden in een goed afgesloten weefselpotje gevuld met 4% gebufferde formaldehyde. Fixeren bij kamertemperatuur.

Huidexcisie:

Een afgenomen huidexcisie moet ingestuurd worden in een goed afgesloten weefselpotje gevuld met 4% gebufferde formaldehyde. Zo nodig moet de excisie duidelijk worden gemarkeerd met één of meerdere hechtdraden (dit ook duidelijk aangeven op het aanvraagformulier). Fixeren bij kamertemperatuur.

Bewaarcondities:

- De weefsels moeten gefixeerd worden bij kamertemperatuur.
- Potjes met daarin weefsel op formaldehyde, moeten **niet in de koelkast** worden geplaatst, omdat dit de fixatie afremt.
- Formaldehydedampen zijn toxisch en dus schadelijk voor de gezondheid. Sluit potjes daarom goed af!

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met het secretariaat van de afdeling klinische pathologie op nummer 055 – 581 82 50 (bereikbaar tussen 8.30-17.00 uur).